

Oxivir Excel™ conc.

Detergent dezinfectant lichid cu spectru larg de acțiune, destinat și pentru dispozitive medicale

Descrierea produsului

Diversey Care Oxivir Excel conc. este un agent de curățare și dezinfectant într-un singur pas, cu spectru larg, gata de utilizare și timpi scurți de contact. Bazat pe tehnologia brevetată a Diversey Care cu formulă accelerată pe bază de peroxid de hidrogen, Oxivir Excel poate fi utilizat pe suprafețe dure, neporoase, și pe anumite articole de mobilier delicate.

Proprietăți cheie

- Bactericid, virucid, levuricid, fungicid, sporicid*
- Dezinfectează în mai puțin de 1 minut
- Profil pozitiv de siguranță pentru utilizator și suprafețe
- Curățare eficientă
- Nu conține parfum
- Se descompune în apă și oxigen
- Nu este necesară clătirea

Avantaje




- Eficacitatea cu spectru larg asigură cele mai ridicate nivele de protecție a pacientului. Testat extensiv conform standardelor europene și eficace împotriva mai multor agenți patogeni, este declarat a fi complet virucid inclusiv *Poliovirus*, *Adenovirus* și *Murine norovirus*, considerat eficace împotriva tuturor virusurilor cu anvelopă precum: HIV, HBV, HCV, *Virusul gripal*, *Vaccinia virus* și *Coronavirus*
- Timpii scurți de contact păstrează suprafața umedă, asigurând astfel eficacitatea dezinfectării
- Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării depunerilor de calcar, ceea ce face inutilă etapa de pre-curățare
- Profilul excelent de siguranță pentru utilizator reduce riscul lucrătorilor, fără avertizări de pericol la utilizarea în diluție; nu conține substanțe iritante pentru căile respiratorii
- Formula AHP este delicată cu suprafețele, prelungind durata de viață a echipamentelor
- Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de operații, unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală și saloanele pacienților

Instrucțiuni de utilizare

Diluție

Pentru a obține nivelul de dezinfectare declarat, respectați recomandările pentru dozare.

Declarație	Timpi de contact	Diluție	ml / 1l apă
<i>Bactericid</i>	30 sec	2%	20 ml
	5 min	1,5%	15 ml
<i>Levuricid</i>	5 min	4%	40 ml
<i>Virucid</i>	5 min	2%	20 ml

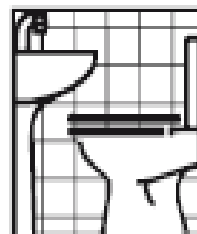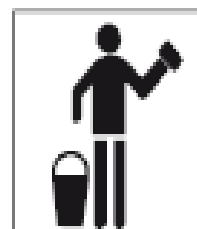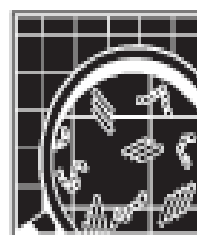

<i>Fungicid</i> *	30min	7%	70 ml
<i>Sporicid</i> *	30min	25%	250 ml

Aplicare

Curățare și dezinfectare prin pulverizare:

1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Aplicați pe suprafețe fie prin pulverizarea pe lavetă și ștergerea suprafețelor, fie prin aplicarea direct pe suprafață utilizând un pulverizator cu pistol.
3. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați să se usuce.

Curățare și dezinfectare prin adăugare în găleată:

1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Aplicați pe suprafețe cu mopul/laveta.
3. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați să se usuce.
4. Schimbați soluția dacă devine vizibil murdară sau cel puțin la fiecare 24 ore.

Sistem cu șervețele uscate de unică folosință

1. Pregătiți sistemul cu șervețele uscate de unică folosință, conform instrucțiunilor.
2. Îndepărtați murdăria grosieră.
3. Scoateți un șervețel și ștergeți suprafața.
4. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați să se usuce.
5. Schimbați șervețelul atunci când este vizibil murdar sau când treceți la o altă zonă de curățat.

Important: Nu utilizați apă caldă. A nu se amesteca cu alte produse. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la apă sau acid.

*Atunci când este utilizat ca dezinfectant final cu etapă preliminară de curățare

**Asigurați-vă că suprafețele rămân ude pe durata timpului de contact

Date tehnice

Aspect:	lichid limpede, incolor
Densitate relativă [20 °C]:	1,000
pH (în soluție):	1,9
pH - stare pură (la diluție x)	0,55
Punct de aprindere:	N/A
Termen de valabilitate	720 zile
Parfum	neutru

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Informații despre manevrare și depozitare în siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă separat. A se păstra în ambalajul original. A se evita temperaturile extreme. Reacționează în contact cu substanțele oxidabile.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, Oxivir Excel de la Diversey este adecvat pentru majoritatea materialelor uzuale.

Informații ecologice

Surfactanții utilizați în compoziția acestui produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate finală în conformitate cu Regulamentul UE privind detergenții, CE 648/2004.

Date microbiologice

Eficacitate dovedită prin conformitatea cu: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704

Dimensiuni disponibile ambalaj

Codul articolului Dimensiune ambalaj Tip ambalaj