



Cod document

FM-1.4.0

Ediție 1,

Revizie 0

Data emiterii:

07.11.2020

ROSERV PHARMA SRL

CUI RO 26304801, J 17/1307/2009

SEDIU SOCIAL: Municipiul Galați, B-dul Marea Unire, nr. 21, camera 2, bl. U6, Sc. 1, Et. 6, ap. 21, Județ Galați

ADRESĂ PUNCT DE LUCRU PRODUCȚIE: Str. FOLTANUL, Nr. 86, CORP B, Sat Vinători, Com. Vinători, Jud. Galați, Cod poștal 807325

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI MEDICAL Mască facială de uz medical Dr. Quinn -Tip IIR

ROSERV PHARMA SRL

RO 26304801, J17/1307/2009

B-dul. Marea Unire 21 Bl. U6 Sc. 1 Et. 6 Ap. 21, Loc. Galați, Jud. Galați, Cod 800329


Denumire produs:

Mască facială de uz medical Dr. Quinn - Tip IIR, 3 straturi, 3 pliuri

SR EN 14683+AC:2019

Dispozitiv medical clasa I, nesteril

produs de unică folosință

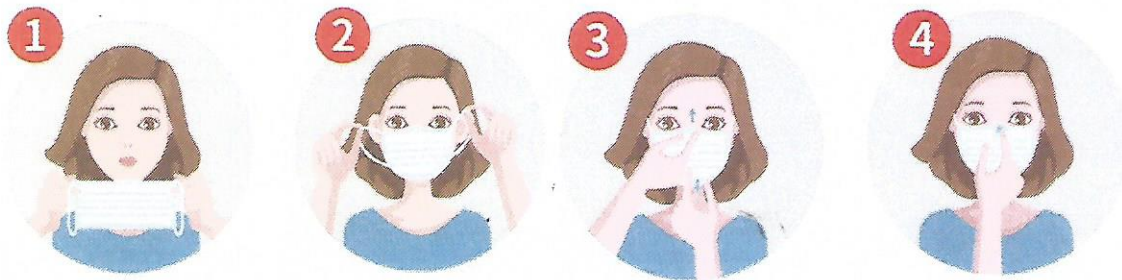

RO

1. Spălați-vă pe mâini înainte de a vă poziționa masca, apoi o prindeți cu degetele.
2. Așezați masca orientată cu banda metalică în sus, cu partea colorată spre exterior și partea albă spre interior și agățați benzile elastice pe ambele urechi.
3. Apăsați banda metalică cu ambele mâini pe nas, trageți masca în sus și în jos pe bărbie, verificați dacă marginile sunt bine fixate.
4. Apăsați ușor banda metalică pentru a vă asigura că este fixată pe baza nasului, pentru protecție optimă.

EN

1. Wash your hands before positioning your mask, then grasp it with your fingers.
2. Put the nose clip of the mask upward, colour outside, white inside and cling the mask by placing the elastic ribbons onto the ears.
3. Press the metallic clip with both your hands on the nose, pull the mask up and down to the chin, check edge fit.
4. Press the nose clip gently to make it fully fit the bridge of the nose, for best protection.

Semnat pentru și în numele ROSERV PHARMA SRL, 07.11.2020

Administrator, RĂȘCANU GHEORGHE

