

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ZHIVAHX SPRAY MD

Soluție gata preparată pentru dezinfectia rapidă a instrumentelor și dispozitivelor medicale invazive și non-invazive și a ustensilelor din saloane de înfrumusețare



CE 1639

ARIA DE APLICARE

Zhivahex Spray MD este destinat dezinfectării rapide a instrumentelor medicale și dentare rezistente la alcool și a echipamentelor medicale și dispozitivelor medicale invazive și non-invazive, inclusiv a sondelor pentru ecograf și a ustensilelor din saloane de înfrumusețare. Obiectele tratate pot fi folosite imediat după expirarea timpului de expunere fără clătire cu apă.

PROPRIETĂȚI:

Zhivahex Spray MD este o soluție gata preparată, fără aldehide și fenoli. Este o combinație activă echilibrată și sinergică de alcool și clorhexidină. Conține inhibitori de coroziune, nu afectează suprafețele rezistente la alcool și este compatibil cu diferite materii.

Aspect Lichid clar verzui cu parfum plăcut.
pH 5.0 – 7.0

COMPOZIȚIE:

Fiecare 100 g Zhivahex Spray MD conțin:

Substanțe active:

0,5 g Chlorhexidin digluconate (100%) (CAS 18472-51-0)
60,0 g Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Ingrediente auxiliare:

Inhibitori de coroziune, parfum, colorant.

CLASIFICARE:

Zhivahex Spray MD este conform cu cerințele pentru dezinfectante chimice ale Directivei Europene pentru Dispozitive Medicale și este clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb.



BORERO COMSERV SRL

BRAȘOV, Str. Carpenului Nr. 11, ap. 11
C.U.I. **RO8224283** Nr. Reg. Com. **J08/257/1996**
Tel/Fax: 0268-541590, E-mail: office@borero.ro
website: www.borero.ro www.biclosol.ro



SPECTRU DE ACTIVITATE:

Activitate microbiologică	Standard	Timpi de acțiune
Bactericid (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>E. coli</i>)	EN 14561 EN 13727	5 min
Fungicid (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	EN 14562 EN 13624	5 min
Tuberculocid (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 min
Virucid	EN 14476	5 min

METODA DE APLICARE

Zhivahex spray MD se aplică nediluat. Dezinfecția se realizează prin sprayerea instrumentarului și dispozitivelor, utilizând pompa flaconului până la umezirea completă sau prin imersia obiectelor tratate în soluție. Timp de expunere 5 minute.

Curățarea instrumentelor înainte de dezinfecție este recomandată.

După expirarea timpului de expunere, obiectele procesate pot fi utilizate imediat, fără clătire cu apă.

Atenție!

Nu utilizați pe suprafețe din **Poly(methyl methacrylate) (PMMA)** (mărci comerciale: Plexiglass, Acrylite, Crylux) – poate cauza may cause a cloudiness on the surface.

CONDIȚII DE STOCARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se pătra în ambalajul original, bine închis în incinte uscate și bine ventilate, departe de surse inflamabile, surse de aprindere cu flacără deschisă, la temperaturi sub 35° C. A nu se expune la lumina directă a soarelui.

PRECAUȚII

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și solicitați ajutorul medicului. În caz de înghițire, nu induceți vomă, solicitați imediat ajutorul medicului și arătați ambalajul și eticheta.

AMBALARE

Flacoane de 750 ml cu pompă pulverizatoare.

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani