



SC BORERO COMSERV SRL
BRAȘOV, Str. Zizinului, nr. 110
C.U.I RO8224283 Nr. Reg. Com. J08/257/96
Tel/Fax: 0268-541590, E-mail: office@borero.ro
Website: www.borero.ro www.biclosol.ro



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ENZYDIP-3 AM



CE 0120

Lichid concentrat pentru curățarea enzimatică și dezinfectia instrumentelor medicale invazive și non invazive și a echipamentelor medicale.

Proprietăți:

Formula preparatului **ENZYDIP-3 AM** se bazează pe combinația sinergică dintre un biocid foarte eficient, surfactanți și un complex de 3 enzime (protease, amylase și lipase). Îndepărtează ușor și eficient sângele, resturile de țesut, proteină, mucus, excremente și alte încărcături organice contaminate de pe instrumentele medicale, realizând în același timp, o dezinfecție eficientă.

ENZYDIP-3 AM este compatibil cu diferite materiale: oțel inoxidabil, aluminiu, metale neferoase, polivinilchloride, cauciuc și plastic.

Este solubil și se prepară cu apă de la robinet. Duritatea apei nu scade eficiența soluției.

Aspect:

Aspect: Lichid transparent spre maro deschis
pH 1% soluție: 8.5-9.5
Densitate: 1.04-1.09 g/cm³

Substanțe active:

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9)	5.0 g / 100g
Enzyme complex – Protease (CAS 9014-01-1), Alpha-amylase (CAS 9000-90-2) și Lipase (CAS 9001-62-1)	18.0 g /100g

Clasificare:

ENZYDIP-3 AM respectă cerințele Directivei Europene privind Dispozitivele Medicale 93/42/EEC pentru dezinfectanți chimici și este clasificat ca dispozitiv medical Clasa IIb.

Spectru de activitate:

Bactericid, fungicid și virucid

Aria de aplicare:

ENZYDIP-3 AM este un preparat concentrat și trebuie utilizat diluat.

În funcție de tipul și nivelul de încărcare proteică, **ENZYDIP-3 AM** poate fi folosit în diferite concentrații.

Concentrațiile recomandate pentru soluția de lucru sunt între 0,5% - 1.0% (5,0 - 10,0 ml / 1 l apă), preparată cu apă de la robinet. Dezinfecția și curățarea se realizează prin imersia completă a instrumentelor medicale și echipamentelor în soluție, la temperatura camerei. Lichidul trebuie să pătrundă în toate spațiile și cavitățile instrumentarului.

În prealabil, este recomandată îndepărtarea mecanică a resturilor organice uscate, cu o perie sau un burete.

Timpul de acțiune este 15 minute.

ENZYDIP-3 AM poate fi folosit pentru dezinfecție și curățare și în băi cu ultrasunete.

La scoaterea din soluția de lucru, instrumentele medicale și echipamentele necesită clătire și uscare.

Condiții de stocare:

30° C

Păstrați în locuri uscate și bine ventilate la temperaturi 0° C

Pentru mai multe detalii consultați Prospectul și Fișa Tehnică de Securitate.

Ambalaj:

3, 5, 10 L

Termen de expirare:

2 ani

**Producător**

„ZHIVAS“ LDT

1592 Sofia, 14, Assen Jordanov Blvd, BULGARIA

Tel.: +359 2 981 78 23

www.zhivas.com