

ENZYDIP - 3 AM

Preparat lichid concentrat pentru
curățarea enzimatică și dezinfectia
instrumentelor medicale
invazive și non invazive
și a echipamentelor medicale



CE 0120 Marcaj CE - SGS Marea Britanie

Proprietăți:

Formula preparatului **ENZYDIP-3 AM** se bazează pe combinația sinergică dintre un biocid foarte eficient, surfactanți și un complex de 3 enzime (proteaze, amylase și lipase). Îndepărtează ușor și eficient sângele, resturile de țesut, proteină, mucus, excremente și alte încărcături organice contaminate de pe instrumentele medicale, realizând în același timp, o dezinfectie eficientă.

ENZYDIP-3 AM este compatibil cu materialele uzuale cum ar fi: oțel inoxidabil, aluminiu, metale, neferoase, polivinilcloride, cauciuc și plastic. Este solubil și se prepară cu apă de la robinet. Duritatea apei nu scade eficiența soluției.

Substanțe active:

- N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) 5.0 g / 100g
- Enzyme complex – Protease (CAS 9014-01-1), Alpha-amylase (CAS 9000-90-2) și Lipase (CAS 9001-62-1) 18.0 g /100g

Clasificare:

ENZYDIP-3 AM respectă cerințele Directivei CE privind Dispozitivele Medicale 93/42/EEC pentru dezinfectanți chimici și este clasificat ca dispozitiv medical Clasa IIb.

Spectru de activitate: Bactericid, fungicid și virucid.

Aria de aplicare:

ENZYDIP-3 AM este un preparat concentrat și trebuie utilizat diluat. În funcție de tipul și nivelul de încărcare proteică.

ENZYDIP-3 AM poate fi folosit în diferite concentrații. Concentrațiile recomandate pentru soluția de lucru sunt între 0,5% - 1.0% (5,0 - 10,0 ml / 1 l apă), preparată cu apă de la robinet. Dezinfectia și curățarea se realizează prin imersia completă a instrumentelor medicale și echipamentelor în soluție, la temperatura camerei.

Soluția trebuie să pătrundă în toate spațiile și cavitățile instrumentarului.

În prealabil, este recomandată îndepărtarea mecanică a resturilor organice uscate, cu o perie sau un burete.

Timpul de acțiune este 15 minute.

ENZYDIP-3 AM poate fi folosit pentru dezinfectie și curățare și în băi cu ultrasunete.

La scoaterea din soluția de lucru, instrumentele medicale și echipamentele necesită clătire și uscare.

Ambalare: 3, 5, 10 L. **Condiții de stocare:** Consultați Fișa Tehnică de Securitate

